

# ANIOS LUB

INVIMA:  
No Requiere

Lubricación  
por remojo de  
instrumentación  
articulada

## Indicaciones

Lubricación por remojo de instrumentación articulada.

## Instrucciones de uso

ANIOSLUB debe ser usado a una dilución de 2.5%. Ejemplo: 25 ml por litro de agua. Tiempo de activación del producto: 48 horas. Sumerja los instrumentos en la solución ANIOSLUB durante 1 minuto y escurrir bien. Prueba de la capacidad microbiana 3, 6 y 9 días.

## Composición cualitativa

Tensioactivos no iónicos y catiónicos.  
Agentes lubricantes.  
Conservantes.  
Libre de silicona.

## Propiedades fisicoquímicas

Densidad a +20°C: Aprox. 1.007  
pH de producto puro a 20°C: Aprox. 8.3

## Precauciones de uso

Por favor consulte la hoja de datos de seguridad y etiqueta.  
Preparación clasificada de acuerdo con la Directiva Europea  
« Preparaciones peligrosas » 1999/45 / CE

## Embalaje

Caja de 3 frascos, dispensadores de 1 litro..... REF: 883.137

