

# ANIOS R444

INVIMA:  
No Requiere

## Renovador del Instrumental de inox



- Elimina las manchas de óxido (pasivación)
- Suprime los depósitos minerales
- Utilización en remojo: sistema de dosificación incorporado


### INDICACIONES

Producto especial para pulir los instrumentos de acero inoxidable y los dispositivos médicos. Elimina los restos proteicos, los depósitos de óxido de hierro y otras manchas de oxidación.

### CARACTERÍSTICAS

- Solución líquida límpida.
- Densidad a 20°C: 1,360 +/- 0,005
- pH (producto diluido) a +20°C : aprox 1,25

PRODUCTO  
PARA DILUIR  
5ml/50 ml → 1 L

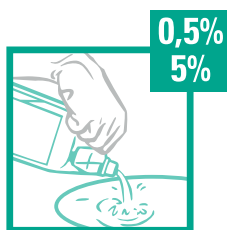

# ANIOS R444

Renovador del Instrumental de inox.

## MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar del producto, protéjase adecuadamente: mascarilla, gafas y guantes.

Solución concentrada para uso profesional.

Utilización en remojo para diluir de 0.5 a 5% en agua templada.

- Sumerja el instrumental.
- Tiempo de remojo: de 1 a 2 horas (controle el estado del instrumental cada 30 minutos).
- Extraiga el instrumental del baño cuando esté bien pulido.
- Enjuague abundantemente y seque.
- Renovar el baño de remojo al menos una vez al día.

## PRECAUCIONES DE USO

Producto peligroso. Respétense las precauciones de empleo (Establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos).

Almacenamiento: de +5°C a +35°C.

Dispositivo médico de clase I (Directiva 93/42/CEE modificada).

## ACONDICIONAMIENTO

3 frascos de 1 L dosificador.....Réf. 0191.137



DISTRIBUIDO POR



Carrera 10A # 121-48 Oficina 403  
Telf.: +57 313 883 0023  
Email: info@biosmart.co  
www.biosmart.co

