



Laboratoires  
**ANIOS**  
Le professionnel de la désinfection

Registro INVIMA: 2016DM-0014800

ASPIRACIÓN

DENTASEPT®

# Aspiration AF+

## INDICACIONES

Limpieza y desinfección de circuitos de aspiración en entornos dentales. Compatible con los diferentes sistemas de aspiración. No produce espuma.

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ✓ No espumante
- ✓ Triple acción - limpiador, desincrustante y desinfectante
- ✓ Dilución muy económica de 2%: 5 L de concentrado = 250 L de solución lista para usar
- ✓ Eficaz al cabo de 15 minutos – activo contra todos los virus envueltos<sup>1</sup>
- ✓ No es considerado peligroso para el medio ambiente cuando está diluido a 2%
- ✓ Dispositivo médico de clase IIa (Directiva 93/42/CEE modificada)

<sup>1</sup> El Instituto Robert Koch (RKI) recomienda la utilización de desinfectantes con una actividad virucida limitada para interrumpir la cadena de la infección. Según el RKI, una actividad virucida limitada (eficaz sobre los virus envueltos) corresponde a una actividad sobre virus vacuna y BVDV.

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS A 20°C

Bactericida: EN 1040, EN 13727, EN 14561 – 15 minutos  
Levaduricida: EN 1275, EN 13624, EN 14562 – 15 minutos  
Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 – 60 minutos  
Activo según EN 14476 frente a herpesvirus, BVDV (virus modelo HCV), Vaccinia virus – 5 minutos.

## COMPOSICIÓN

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, asociación de agentes tensioactivos, agente secuestrante, colorante y excipientes.

## ACONDICIONAMIENTO Y ACCESORIOS

Frasco dosificador de 1 litro  
Bidón de 5 litros con bomba dosificadora  
Dentasept® ASP System (424050).



(424050)



ASPIRACIÓN

# DENTASEPT<sup>®</sup> Aspiration AF+

## PROTOCOLO DE USO

Limpieza y desinfección de los circuitos de aspiración en entornos dentales. Compatible con los diferentes sistemas de aspiración. No produce espuma.


### ANTES DE UTILIZAR

Usar guantes adecuados.

### MODO DE USO

Al final del día, preparar 2 litros de solución diluida con el Dentasept<sup>®</sup> ASP System.

- 1 Diluir al 2% (40 ml para 2 litros de agua). Frasco de 1 litro: Llenar el dosificador hasta el indicador de 20 ml y repetir la operación. Bidón de 5 litros: 2 presiones de bomba.
- 2 Sacudir delicadamente el Dentasept<sup>®</sup> ASP System para mezclar la solución.
- 3 Desenroscar parcialmente el tapón negro para permitir que el aire sea aspirado en el Dentasept<sup>®</sup> ASP System. Fijar los tubos del sistema de aspiración y aspirar la solución diluida.
- 4 Dejar actuar la solución durante 15 minutos como mínimo. Se puede dejar actuar la solución durante toda la noche.
- 5 Llenar el Dentasept<sup>®</sup> ASP System con 1 litro de agua limpia como mínimo y aspirarla en el sistema de aspiración.

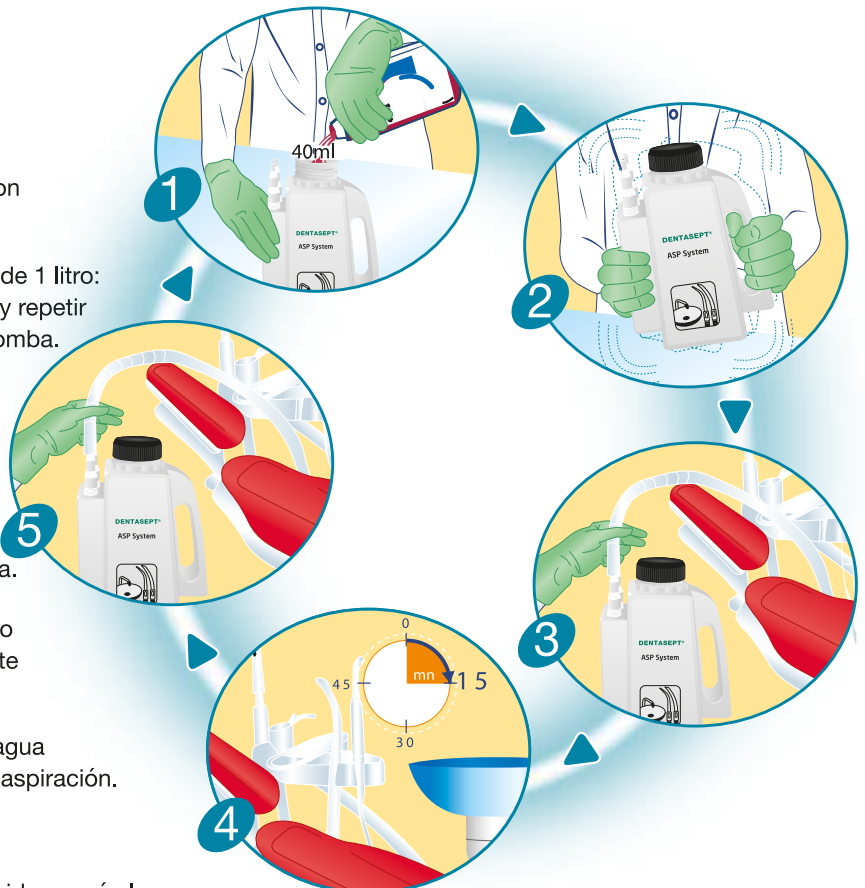

### PRECAUCIONES

Peligroso: respetar las precauciones de uso (establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y de etiquetado de productos químicos). Antes de utilizar, leer atentamente la etiqueta y las informaciones relativas al producto. Para uso profesional únicamente. Dispositivo médico de clase IIa (conforme a la directiva 93/42/CEE modificada, relativa a los dispositivos médicos). Conservar entre +5°C y +35°C.

### DISTRIBUIDO POR



Carrera 10A # 121-48 Oficina 403  
Telf.: +57 313 883 0023  
Email: info@biosmart.co  
www.biosmart.co

