

ANIOSURF NPC

INVIMA:
No Requiere

Detergente
Desinfectante
suelos y superficies



- Producto formulado sin aldehído o tensioactivo anfótero
- Eficacia antimicrobiana (en presencia de agua dura y proteínas): bactericida, levaduricida, tuberculocida, activa sobre HIV-1, HBV (PRV) e HCV (BVDV)
- pH neutro (producto puro y diluido)
- Compatibilidad con las materiales de síntesis, los suelos y las superficies
- Compatibilidad con detergentes ANIOS

INDICACIONES

Limpieza y desinfección de suelos, paredes y los materiales (incluido el material médico).

CARACTERÍSTICAS

- Líquido límpido incolora
- Utilizable en agua fría o caliente
- pH del producto puro : aprox. 7
- pH del producto diluido : aprox 7,2
- No corrosivo (ausencia de oxidante)

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml -> 8 L



ANIOSURF NPC

Detergente Desinfectante suelos y superficies

MODO DE EMPLEO



1 Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua.
Dilución al 0,25 %: colocar una dosis de 20 ml de ANIOSURF en el recipiente de lavado.



2 Tras haber realizado un barrido húmedo de la superficie, proceder al lavado respetando el esquema de limpieza: desde el fondo hasta la salida.
No aclara la superficie.



3 Cambie la gasas tantas veces como sea necesario. Introduzca las gasas sucias en el recipiente previsto para este fin. Después de limpiar cada sector, cambie la gasa y renueve la solución de lavado.

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecildimetilamonio [N° CAS 7173-51-5 : 65 mg/g),
Clorhidrato de polihexametileno biguanida [N° CAS 27083-27-8 : 12 mg/g), excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso. Respetar las precauciones de uso [establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones] Utilizar los biocidas con precaución. Antes de su utilización, leer la etiqueta y la información relativa al producto.
Almacenar entre +5°C y +35°C.
Producto biocida destinado a la desinfección de superficies [Grupo 1 - TP2 - Directiva 98/8/CE]

ACONDICIONAMENTOS

ANIOSURF NPC

- 1 12 frascos de 1 litro
Con dosificador Ref. 1674.092CO
1674.092UO
- 2 4 bidones de 5 L.
Con 1 bomba dosificadora de 20 ml..... Ref. 1674.036

DISTRIBUIDO POR



Carrera 12 # 118-64 Oficina 102
Telf.: +57 313 883 0023
Email: info@biosmart.co
www.biosmart.co

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo sobre	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 1276, MRSA [EN 13727] Acinetobacter baumannii [T 72-300]	5 minutos
Micobacterias	M. tuberculosis [B.K.] *	5 minutos
Levaduras/ Mohos	EN 1275 [C. albicans] EN 1650 [C. albicans], EN 1275 [A. niger] T 72-300/301 [A. niger, A. fumigatus]	5 minutos 15 minutos
Virus	BVDV [virus modelo HCV] HIV-1, PRV [virus modelo HBV] Influenza A [H ₁ N ₁]	5 minutos 15 minutos

* Eficacia obtenida a 0.5%

