

OPASTER

TIRAS DE CONTROL ESPECÍFICAS PARA EL CONTROL DE LA CONCENTRACIÓN DE ORTOFTALDEHIDO

INVIMA: 2010DM-0006078

INDICACIONES

Control de la concentración de ortoftaldehido en la solución de desinfección total en frío.

MODO DE EMPLEO

- Utilizar la tira de control para validar la actividad de la solución desinfectante:
 - Al comenzar la sesión o al reanudar la actividad después de una interrupción.
 - Cada 4 horas de actividad consecutiva.
- Sumérgase totalmente la parte reactiva de la tira en la solución durante 2 segundos.
- Eliminar el exceso de solución agitando ligeramente la tira.
- Leer el resultado 120 segundos (2 minutos) después de sumergir la tira. En caso de no respetar correctamente las indicaciones podrían producirse errores en la interpretación de los resultados.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN


Las tiras permanecen estables 24 meses si se conservan entre 2 y 8°C, alejado de la humedad.

Las tiras permanecen estables 12 meses si se conservan a una temperatura ambiente.

Conservar el frasco cerrado para garantizar la duración de las tiras.

Después de abrir el frasco por primera vez, éste puede conservarse durante 90 días (3 meses) a temperatura ambiente.

COLOR BLANCO A GRIS

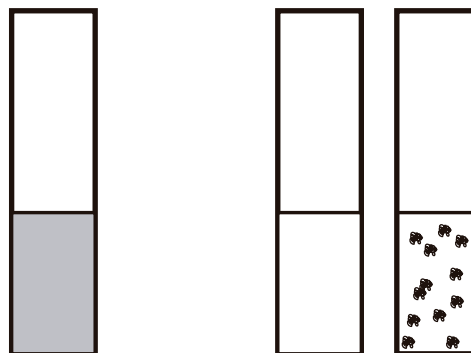

CONFORME

NO CONFORME

- Sin color
- Desaparición rápida del color
- Puntitos

DISTRIBUIDO POR



Carrera 10A # 121-48 Oficina 403
Telf.: +57 313 883 0023
Email: info@biosmart.co
www.biosmart.co

